



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務
Geronteck Education and Rental Service

醫療護理超低床



01 器材介紹



02 使用說明 手動遙控器

❖ 手動遙控器總共有**10個操作按鍵**和**2種指示燈**，利用遙控器就可以進行各個位置的升降



聯動升降



可以聯動調節
背部和膝部床
板角度

*** 讓使用者作出各種舒適的姿勢調整 ***

背部升降



調節背部床板
的角度，方便
使用者坐起身
和進食


腳部抬起



配合背部的上
升，協助使用
者保持坐姿

*** 有助防止身體向下滑 ***

床架高度

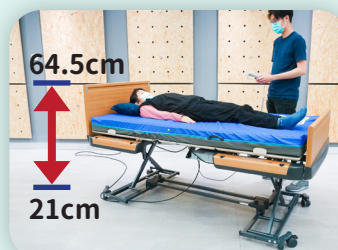

方便在一個合
適的高度進行
扶抱, 翻身或其
他轉移動作

*** 讓使用者雙腳平穩踏地，方便進行轉移 ***

*** 最低更可降至離地21cm, 減低從床上跌落受傷風險 ***

記憶模式



記憶模式是透過照顧者或者治療師預先為使用者設定的位置，調節背部床板、腳部上抬角度和床架高度

❖ 如需要了解記憶模式設定，歡迎向中心職員查詢

控制器界面

錯誤代碼：



如護理超低床發生錯誤或故障時，螢幕會顯示**錯誤代碼**

操作禁止顯示：



按下已上鎖按
鍵時會顯示**鎖
定圖示**

*** 如護理超低床發生錯誤或故障時，螢幕會顯示錯誤代碼。請聯絡中心職員查詢 ***

電源指示燈

❖ 電源指示燈可以反映護理床通電情況：




亮燈(綠)

正常的通電狀態



閃爍(紅)


發生故障

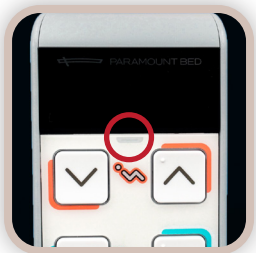

熄滅

電源插頭或遙控器插頭脫落，或停電、斷線等情況時

操作選擇指示燈

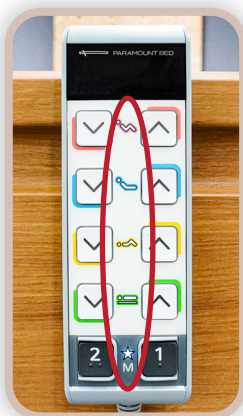

操作選擇燈會反映操作按鍵的使用狀態：

- ❖ 亮燈(白)：可操作狀態
- ❖ 熄滅：電源變為“OFF”。或者禁止操作狀態

設定鍵



如使用者誤觸設定鍵並意外進入設定模式，
可再次按下設定鍵離開



若使用者誤進
設定模式後作
出誤設



請避免再次按
下設定鍵，否
則有機會儲存
該設定

如發生上述情況，請等待20秒，遙控器將會自動離開設定模式，並不會儲存任何設定

設定會由中心職員或治療師進行，使用者不建議使用

注意



- ❖ 請勿用力拉扯或壓住電源線及遙控器連接線，避免造成損壞



- ❖ 操作時，避免利用指甲或尖銳的物品按壓及同時按下多個操作鍵，以免破損



- ❖ 不使用遙控器時，應懸掛在床尾、床頭板或床欄外側，有需要可先將其拔掉或關閉，避免誤按及導致損壞

- ❖ 切勿把遙控器交由無法正確使用之人士操作，應謹慎操作避免發生事故

03 使用時注意



如需由敞卧至坐起時，建議把**背、腳部**都同時抬起，方便保持姿勢



需要從床上離開或進行轉移時，請將護理床升至適合起身之高度



於休息和睡眠期間或當照顧者要離開無法自行操作護理床的使用者時，應根據使用者狀況，盡量將床板回復水平，建議將護理床的**高度調較至最低**，以減低從床上跌倒受傷風險

- ❖ 當護理床架下降到30cm時，並會發出“嗶嗶”提示聲並且停止下降
- ❖ 放開並重新按下降時鍵時，會發出“嗶嗶”提示聲，並同時下降到21cm (最低高度)。而當接近最低高度時，提示聲的間隔亦會變短

切換腳部上抬角度

調高腳部上抬角度

❖ 膝部床板上升後腳部角度可調高，配合不同使用者需要。切換方法如下：

1



將腳部床板
抬起

2




把支撐桿從
床板底部的
夾扣中拉出

3



將支撐桿對
準放入護理
床床架兩則
的撐桿座

4

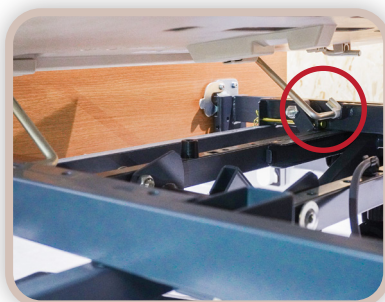

並放下腳部
床板

還原腳部上抬角度

1



將腳部床板
抬起

2



把支撐桿對
準並扣至床
板底部夾扣

3



最後將腳部床板慢慢放下

注意

❖ 調較腳部上抬角度時，要小心夾手

❖ 調高時，請確保支撐桿對準放入床架兩則的撐桿座，否則有機會導致護理床損毀



04 注意事項

- ❖ 護理床上使用者的最大承重量為138kg，連附屬品(如:床欄、床褥)總承重量為174kg
- ❖ 護理床電源插頭請直接使用插座，避免使用拖板
- ❖ 於護理床上使用電子醫療設備時，請先拔掉電源以免受到干擾
- ❖ 護理床有區分頭或腳板部份，應留意正確的使用方向和卧床姿勢，避免因不當使用而受傷
- ❖ 切勿在護理床上跳躍或作階梯使用
- ❖ 應確保護理床週邊及底部沒有擺放物品和電線，以免影響運作或電線損毀，造成意外
- ❖ 小心肢體、衣物、電源線或其他週邊物品卡進床板與床架的縫隙中，以免受傷及造成損壞
- ❖ 請勿於護理床附近使用暖風機等加熱儀器，否則有機會導致護理床變形或火災等危險
- ❖ 如一段時間不使用護理床，請將背板和腳板放置水平，床調至最低位置和將電源拔掉



移動護理床時

- ❖ 移動護理床時，應先將床欄裝上，盡量由兩位或以上人士操作，以免推行過程中發生意外
- ❖ 移動護理床時亦必須先拔走電源插頭，將電源及遙控器電源線繞好後再操作
- ❖ 毋需移動護理床時需鎖上床輪，以免護理床再滑動
- ❖ 請勿把護理床放置於太陽直射、濕度太高、低溫、乾燥或不平坦的位置上



檢查及保養

❖ 使用前可先檢查各個動作，確保運作暢順。如：

動作運行時有否噪音

各功能動作能否運作

腳輪是否能夠鎖定或解除

電源線及遙控器連接線是否連接妥當

遙控器畫面和燈光是否亮起

- ❖ 應定期檢查床架、床板、床欄、電線及插頭等有否破損或變形
- ❖ 如發現各個零件有鬆脫情況或安裝後出現問題，應盡快通知中心職員，請勿自行修理，切勿繼續使用

05 清潔及保養

- ❖ 如需清潔，可使用乾燥柔軟的抹布擦拭床架
- ❖ 請勿使用具揮發性的清潔劑，會導致床架變色及變質
- ❖ 如發現頑固污漬，可用濕布及中性清潔劑擦拭，再徹底擦乾，否則可能會導致零件破損
- ❖ 如需用濕布清潔時，應先拔掉電源插頭，避免觸電
- ❖ 避免電源插頭上粘附灰塵，請定期拔掉電源插頭，用乾布擦拭

06 特別功能床褥

器材介紹



設有硬身長邊緣，能穩定使用者坐在床邊時的坐姿，方便借力上落床



於床墊中間的高密度海綿，在升起背部時，能固定使用者的臀部和坐姿



設有可伸展及滑動海綿層，分別有助分散和減少身體承受的壓力及減低床墊與皮膚的摩擦，預防壓瘡

使用說明



床墊的藍色部分是正面，白色圖案的一側為床尾



請確保床墊固定在床板上的床墊固定架內

- ❖ 不需要在床墊上下方另加床墊，以免影響床墊和護理床功能
- ❖ 此床墊可配合醫療護理超低床KQ使用

清潔及保養

- ❖ 請勿拆除床墊套
- ❖ 請使用已稀釋的中性清潔劑清潔，擰乾毛巾/抹布水分後才擦拭
- ❖ 如需消毒，可用消毒酒精

注意事項

- ❖ 請勿撕掉床墊標籤，以免破壞床墊套表層
- ❖ 請勿站在床墊上及在床墊上擺放重物，以免床墊變形



****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動醫療護理超低床及特別功能床褥，如有疑問，請向中心職員查詢****

07 聯絡資訊

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252 ☎ 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號鋪

觀看說明影片

