



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

床邊餐桌 - PM

床邊餐桌 - PM

01 器材介紹



高度調節把手

設於桌面與主升降桿旁邊

滾輪

- 可方便使用者安坐於床上進餐
- 餐桌的高度可供調較，配合使用者需要及減輕照顧者負擔
- 最高可升至離地44cm；最低則可降至29cm
- 餐桌底部設有滾輪，可按需要移動至合適的位置

02 使用方法 調較高度

調高桌面時

1. 調高時，一隻手握住把手
2. 另一隻手扶穩餐桌面
3. 稍稍用力將桌面往上拉，
放開把手，餐桌便會鎖定



02 使用方法 調較高度

調低桌面時

1. 調低時，一隻手握住把手
2. 另一隻手扶穩餐桌面
3. 稍稍用力將桌面向下壓
4. 放開把手，餐桌便會鎖定



03 注意事項

- 床邊餐桌**最大承重為30KG**，請勿放置雜物於餐桌上
- 床欄與餐桌應保持適當的距離，避免碰撞
- 如需轉換護理床的使用狀態，建議先移開餐桌，待調整後再還原，避免過程中與身體發生碰撞
- 此器材只可作餐桌用途，請勿當作其他轉移輔具使用

04 清潔及保養

- ▶ 可使用中性清潔劑清潔，再用已扭乾水的濕布擦拭，再抹乾
- ▶ 請放置於平坦穩妥的地方使用
- ▶ 存放時，請勿放置於潮濕或長期曝曬的位置

****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動床邊餐桌 - PM，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心



3153 5252



3153 5250



ersc@ageathome.hk



新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖