



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Gerontechnology Education and Rental Service Centre

有轆淋浴椅



01 器材介紹



- ✓ 協助使用者於室內淋浴
- ✓ 設有把手及可上鎖車轆，讓照顧者可以安全又輕鬆地將使用者移至浴室
- ✓ 座椅配備活動式扶手，方便轉移及提供保護
- ✓ 伸縮活動腳踏板，可確保使用者移動時，腳部得以承托，以免因被拖行而受傷
- ✓ U型座面設計方便使用者清潔下身
- ✓ 採用摺疊式的開合設計，以方便收納及節省空間

02 安裝方法

打開淋浴椅

1



先將所有車轆鎖上

2



將座面後方的固定鎖向左扭至鬆脫

3



將椅背提起，把固定鎖放回座面後方並且向右扭緊，確保椅背已經鎖實

4



最後放下兩邊扶手

折疊淋浴椅

1



先將所有車輪鎖上

2



提起兩邊扶手

3



將座面後方的固定鎖向左扭至鬆脫，並將椅背放平

4



最後將固定鎖放回座面後方，並且扭實，以免遺失

03 使用說明

1. 上落淋浴椅前，確保將**所有車輪鎖上**
2. 將座椅**兩邊扶手完全放下及收起腳踏板**
3. 使用者坐在床邊雙腳踏地，**手握較遠一方扶手作支撐**站起，然後慢慢坐下淋浴椅
4. 確保**身體貼近椅背**並沒有傾側
5. 緊記放下兩邊扶手，以確保移動時安全
6. **往前拉出腳踏板**，將雙腳放置於腳踏板上
7. 可以開始推動沐浴椅至淋浴位置



04 注意事項



一般情況下，並不建議使用者經常折疊淋浴椅。

如需要折疊淋浴椅，請妥善存放固定鎖，以免遺失。



折疊淋浴椅及放下兩邊扶手時，小心夾手！



轉移使用者前，請確保已鎖上車輪。



上落淋浴椅時，請收起腳踏板。



移動淋浴椅時，必須確保使用者腳部放在腳踏板上。



使用淋浴椅時切勿將重心向前傾，以避免翻倒危險。



推動沐浴椅時，請將兩邊扶手放下，以確保使用者安全。


⚠ 淋浴椅最大負重為75公斤 ⚠

05 清潔及保養

車身金屬及塑料部分，請用中性清潔劑清潔



座背墊請先用溫水再輔以乾淨清水擦淨，然後晾乾

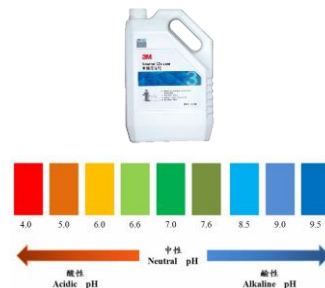

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動有轆淋浴椅，如有疑問，請向中心職員查詢

06 聯絡資訊

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖

觀看說明影片

